

Vollgesichtsvisier VGV

Dokument beinhaltet

08. April 2020

- + Produktinformation
- + Konformitätsbescheinigung (nach Richtlinie EU 2020/403)
- + Gebrauchsanleitung
- + Produktbilder und Link zu Anwendungsvideo



Das Vollgesichtsvisier VGV wurde zum Schutz vor Flüssigkeitsspritzer entwickelt. Die Vollgesichtsvisiere sind hochwertig verarbeitet und mehrfach verwendbar. Um Ihre Gesundheit maximal zu schützen, muss das VGV mit einer zertifizierten Schutzbrille und einer Mundschutzmaske (FFP2 oder FFP3) getragen werden.

Produktbeschreibung

Vollgesichtsvisier in voller Länge für vollständigen Spritzschutz

Über Brille und Mundschutz FFP2 oder FFP 3 tragbar

Desinfizierbar und leicht zu reinigen

Mehrfach nutzbar durch tauschbare Visierscheiben aus Kunststoff

Anti-Beschlag

Keine Hörbeeinträchtigung

Weiche Auflage an der Stirn über geschlossenzelligen latexfreien Schaumstoff, leicht und komfortabel

Einfache und schnelle Positionierung durch verstellbares, elastisches Stirnband mit hochwertigem Kordelstopper

Hochwertiges und robustes Edelstahlstirnband

Visierscheiben kann bei Bedarf von Hand benutzergerecht zugeschnitten werden

Mindestabnahmemenge

Vollgesichtsvisiere VGV 10 Stück

Visierscheibenset 10 Sets (Ersatzteilset mit je 2 Scheiben)

Ansprechpartnerin

Anja Schäfer, Vertrieb

EBERHARDT GmbH & Co.KG

Tel. +49-7135-9862-163

Fax +49-7135-9862-299

a.schaefer@eberhardt-stanztechnik.com

eberhardt-stanztechnik.com

Konformitätsbescheinigung

Produkt

Vollgesichtsvisier

(Konformitätsbescheinigung nach Richtlinie EU 2020/403)

Produzent

EBERHARDT GmbH & Co.KG

Maybachstraße 2

D-74389 Cleebronn

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

Vollgesichtsvisier | Rückseite



Vollgesichtsvisier | Vorderseite



Technische Spezifikation

ID	Art	Anforderung	Bemerkung
E	Ergonomie		
E3	Beschlagfrei	das Beschlagen des Visiers durch Atemluft mit geeigneten Mitteln bzw. durch gewählten Abstand zum Visier reduzieren	
E4	Brillenträger	genügend (einstellbar) Abstand zum Visier ermöglichen	
H	Hygiene Anforderungen		
H1	Beständigkeit ggü. Reinigungsmittel	Alkohol (> 70%), Wasserstoffperoxyd (H ₂ O ₂) (< 10%),	RKI zugelassene Desinfektionsmittel: Desinfektionsmittel Liste beständige Materialien: Liste: rct-online.de
L	Lebensdauer Anforderungen		
L1	Verwendungsdauer	je nach Belastung	
L2	Dauer der Lagerung	> 2 Jahre	
T	Technische Anforderungen		
T1	Vollgesichtsvisier	Visier muss das Gesicht vollständig auch seitlich - verdecken	
T2	Allg. Anforderungen	<ul style="list-style-type: none"> - Hergestellt aus klarem Kunststoff - Verstellbares Band, das fest um den Kopf herum befestigt wird und sich eng an die Stirn anschmiegt - vollständige Abdeckung der Seiten und der Länge des Gesichtes - kann wieder verwendbar sein aus robustem Material das gereinigt und desinfiziert werden kann - oder als Einwegartikel nutzbar <p>Die Verwendung des Gesichtvisiers ist nur in Verbindung mit einer zertifizierten Schutzbrille und zertifizierten Mundschutz (FFP2 und FFP3) zu benutzen. (Hinweis ebenfalls in der Betriebs- und Montageanleitung)</p>	

S	Stakeholder Anforderungen		
S1	Abmaße	B 25cm, H 30cm (Visier)	Kundenwunsch
S2	Materialart	Kunststoff, rostfreier Edcelstahl, Stoff u.a.	
S3	Konformität zu CE	durch Gesetzgeber vorübergehend außer Kraft gesetzt	Kein CE-Zeichen und vorerst kein Konformitätsbewertungs- verfahren nur technische Konformität.

mit der technischen Spezifikation übereinstimmt. Bernd Schellenbauer – Adresse siehe Adresse des Produzenten.

Cleebronn, den 08. April 2020



CEO, Bernd Schellenbauer
 EBERHARDT GmbH & Co.KG
 Maybachstraße 2
 D-74389 Cleebronn

Gebrauchsanleitung

Artikelnummer 218092121
Bezeichnung Vollgesichtsvisier VGV

Artikelnummer 218092130
Bezeichnung Visierscheiben Ersatzset (bestehend aus 2 Scheiben)

Größe Einheitsgröße

Das Produkt ist in zwingender Verbindung mit einer zertifizierten Schutzbrille und zertifizierten Mundschutz (FFP2 oder FFP3) zu benutzen.

Impressum

Urheberrecht:

Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt. Urheber ist die EBERHARDT GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Insbesondere ist jegliche – auch auszugsweise – Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung (Zugänglichmachung gegenüber Dritten), Übersetzung oder sonstige Verwendung verboten und bedarf unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung.

Technische Änderungen:

Änderungen im Sinne technischer Verbesserungen sind uns vorbehalten.

© EBERHARDT GmbH & Co. KG

Alle Rechte vorbehalten

EBERHARDT GmbH & Co.KG

Maybachstraße 2

D-74389 Cleebronn

Tel. +49-7135-9862-0

Fax +49-7135-9862-299

info@eberhardt-stanztechnik.com

1 Allgemein

1.1 Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen für einen sicheren und sachgerechten Gebrauch des Produkts. Die Anleitung ist integraler Bestandteil des Produkts und muss für das Personal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden. Vor dem Beginn aller Arbeiten muss das Personal diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Voraussetzung für ein sicheres Arbeiten ist das Beachten aller Sicherheitshinweise in dieser Anleitung. Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung abweichen. Neben dieser Anleitung gelten die aufgeführten Dokumente: Konformitätsbescheinigung

1.2 Lieferumfang

Der Lieferumfang beinhaltet:

- Haltebügel aus Edelstahl inkl. Polsterung und Fixierband
- Visierscheibe inkl. beidseitig angebrachter Schutzfolie
- Produkte sind **nicht** steril

1.3 Zubehör / Ersatzteile

Das Visier für dieses Produkt ist austauschbar und als Ersatzteil erhältlich, welches separat zu bestellen ist:
Ersatzvisier (Kunststoff) Artikelnr.: 218092130

2 Grundlegende Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt dient ausschließlich dem dafür vorgesehenen Gebrauch (Schutz vor Fremdpartikeln und Abdeckung (frontal und seitlich) des Nutzers). Dieses Gesichtsschild ist **nicht** nach DIN EN 166 zertifiziert und deshalb **keine** persönliche Schutzausrüstung (PSA) gemäß gesetzlicher Vorgaben. Es darf nur zusätzlich zu einer zertifizierten Schutzbrille und einem zertifizierten Mundschutz (FFP 2, FFP 3) getragen werden, darf diese jedoch nicht ersetzen. Insbesondere im Medizinbereich ist ein nach DIN EN 166 zertifizierter Gesichtsschild diesem Gesichtsschild vorzuziehen.

2.2 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung liegt vor, wenn das Produkt nicht im Sinne des zuvor beschriebenen Rahmens eingesetzt wird.

2.3 Produktsicherheit

Es handelt sich hierbei **nicht** um ein Medizinprodukt oder persönliche Schutzausrüstung (PSA). Das Produkt verfügt über keine Normierung.

3 Aufbau und Beschreibung

3.1 Aufbau



Vollgesichtsvisier

(Position 1 - 3 sind bei Anlieferung bereits vormontiert)

- 1) Verbindungselement Haltebügel (inkl. Aufnahmepunkten)
- 2) Haltebügel aus Edelstahl inkl. Polsterung
- 3) Fixierband mit Kordelstopper
- 4) Visierscheibe, beidseitig foliert (inkl. Aufnahmepunkten)

3.2 Beschreibung

Das Produkt besteht aus einem Stirnband mit Abstandshalter für die Visierscheibe. Die Halterung und das Visier sind reinig- und desinfizierbar und somit mehrfach verwendbar.

4 Montage

HINWEIS

Die nachfolgende Montageanleitung erfolgt mittels diverser Bilder, welche durch einzelne Arbeitsschritte stichwortartig ergänzt werden. Die Bezeichnung der einzelnen Positionen erfolgt hierbei entsprechend der Definitionen des Kapitels Aufbau [4.1].

4.1 Allgemeine Information

Das Produkt besteht aus zwei Hauptteilen: Haltebügel und Visierscheibe. Der Haltebügel besteht aus mehreren Einzelpositionen (Pos. 1, Pos. 2 und Pos.3), die im Anlieferungs-zustand bereits vormontiert sind. Durch den Empfänger sind daher ausschließlich der Haltebügel und die Visierscheibe zu montieren, die in einer Verpackungseinheit angeliefert werden. Hinweis: Zur Montage ist kein gesondertes Werkzeug erforderlich. Die Montage findet manuell statt, wobei die Visierscheibe in den (Blech-) Haltebügel eingelegt und verspannt wird. Daher sind vor und während der Montage besondere Vorsicht geboten (Blechteile können ggf. scharfe Kanten aufweisen).

4.2 Arbeitsschritte zur Montage des Visiers

Zur Montage ist die Visierscheibe auf den Bügel zu montieren. Dies wird durch den Formschluss zwischen den Nieten (Blech-Haltebügel) und den Bohrungen (Visierscheibe) sichergestellt. Die folgenden Arbeitsschritte sind (ohne gesondertes Werkzeug) durchzuführen:

- Visierscheibe zwischen Stirnband und Verbindungselement einschieben
- Anbindungspunkte von Visierscheibe und Verbindungselement arretieren / verriegeln (wodurch die Visierscheibe formschlüssig gehalten wird)
- Schutzfolie beidseitig abziehen


Reinigungshinweise

Das Produkt ist reinig- und desinfizierbar. Hierbei ist nach dem Standard des klinikeigenen Hygieneplans vorzugehen, wobei vom RKI empfohlene Desinfektions- und Reinigungsmittel verwendet werden können.

Konformitätsbescheinigung

Siehe Seite 2 in diesem Dokument (im Lieferumfang).

Produktbilder und Anwendungsvideo

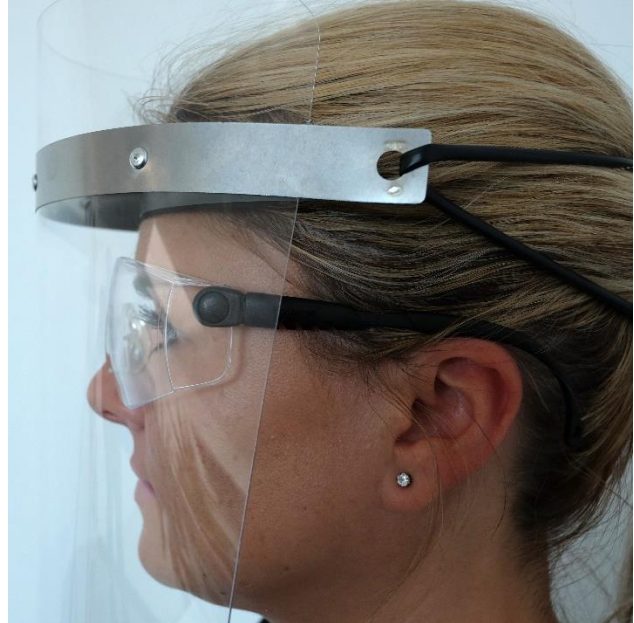

Eberhardt GmbH & Co. KG | Maybachstraße 2 | 74389 Cleeborn | Deutschland | Tel. +49 7135 9862-0 | Fax +49 7135 9862-299 | www.eberhardt-stanztechnik.com
 Kommanditgesellschaft: Sitz Cleeborn | Registergericht Stuttgart HRA 727945
 Pers. haftende Gesellschafterin: Eberhardt Beteiligungs-GmbH | Sitz Cleeborn | Registergericht Stuttgart HRB 742739
 Geschäftsführer: Bernd Schellenbauer, Peter Schubert
 Kreissparkasse Heilbronn | BLZ 620 500 00 | Kontonummer 293484 | IBAN DE20 6205 0000 0000 2934 84 | BIC HEISDE66XXX
 VBU Volksbank im Unterland eG | BLZ 620 632 63 | Kontonummer 321018001 | IBAN DE19 6206 3263 0321 0180 01 | BIC GENODES1VLS | USt-IdNr.: DE815393621



Weiterführende Informationen finden Sie in diesem Video –
Scan QR-Code oder <https://youtu.be/mLfYD7CNG2o>